

NoDec[®]

AIRSTREAM3



Das Therapiesystem
für Hochrisikopatienten bei
bestehenden Dekubitalgeschwüren
aller Stadien

- ➡ Null-Druck Technologie
- ➡ Effektive Schmerztherapie
- ➡ Speziell für die Bauchlagerung konzipiert

Wechseldruckmatratze mit 3 Zellzyklen

AIRSTREAM3 ist eine leistungsstarke 3-Zellen-Zyklus-Wechseldruckmatratze, die die Weiterentwicklung der **Airwave-Technologie*** darstellt.

Entwickelt, um Druckverletzungen bei Patienten mit sehr hohem Risiko vorzubeugen, insbesondere wenn sie erhebliche Mobilitätseinschränkungen haben und/oder wenn eine Neupositionierung schwierig, gefährlich oder unangemessen ist. **AIRSTREAM3** ist auch die Liegefläche der Wahl für die Behandlung von Patienten mit etablierten tiefen Druckverletzungen. (Stadium 3 und 4)

AIRSTREAM3 wurde entwickelt, um die natürliche spontane Bewegung des Körpers als Reaktion auf nicht abgebauten Druck mechanisch nachzubilden. Durch den Einsatz der Airwave-Technologie sorgt die **AIRSTREAM3** für eine regelmäßige und vollständige Druckentlastung aller Körperteile, die mit der Matratze in Kontakt kommen. Die vollständige Beseitigung des Drucks stimuliert eine reaktive Hyperämie in den tiefen Geweben, die die empfindlichen Knochenvorsprünge umgeben, wodurch der Blut- und Lymphfluss gefördert wird, um die Lebensfähigkeit des Gewebes bei bettlägerigen Personen aufrechtzuerhalten.

AIRSTREAM3 hat 20 pfeilförmige Luftzellen, die quer angeordnet sind, mit zwei verstärkten, permanent aufgeblasenen Zellen, die in Längsrichtung an den Rändern verlaufen, um den Patienten vor Stürzen zu schützen und beim Transfer vom Bett zum Stuhl zu helfen. Ein Haltesystem hält die Zellen in fester Position unter dem Körper, so dass während des Ablassens der Kontaktdruck von genau der gleichen Stelle entfernt wird, an der er beim Aufblasen der Zellen ausgeübt wurde. **AIRSTREAM3** ist die Liegefläche der Wahl für Patienten, die auf Intensivstationen gepflegt werden.



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden-Notfall-Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464
Druckhersteller: Online Druck GmbH/flyeralarm.at - Brown-Boveri-Straße 8, 2351 Wr. Neudorf



Technische Spezifikation

Anzahl der Zellen	18-20
Matratzenmaterial	Zellen: Polyurethan Abdeckung: Zwei-Wege-Stretch-Polyurethan-beschichtetes Nylon
Einstufung	Medizinprodukt der Klasse B / Klasse II
Matratzen-Entflammbarkeitsklasse	Entspricht BS7175 Zündquelle 0, 1 und 5
Netzteil-Brennbarkeitsklasse / Schutzart	UL 94 V-0 / IP 42
Stromversorgung / Stromverbrauch	230V~± 10%, 50 / 60 Hz 20 W max.

Luftzellen



Abmessungen

Pumpeneinheit	400 x 160 x 250 mm
Gewicht d. Pumpe	6,8 kg
Gewicht d. Matratze	11,0 kg
max. Patientengewicht	250 kg
Matratzengrößen	2000 x 900 x 230 mm