

Ori-Back Lordosenstütze – Gebrauchsanweisung



Anwendung:

Der Ori-Back ist eine faltbare und mobile Lordosenstütze die eine korrekte, gesunde und ermüdungsfreie Sitzposition ermöglicht. Der Ori-Back ist auf fast allen Sitzmöbeln und am Boden anwendbar.



① Beugen Sie sich zuerst nach vorne und drücken Sie das Gesäß gegen die Ori-Back Rückenlehne.

② Setzen Sie sich auf den Ori-Back und drücken Ihre Hüften gegen die Rückenlehne.

③ Setzen Sie sich aufrecht hin.

Die natürliche, S-förmige Gestalt der Wirbelsäule stützt das Becken so, dass es sich unter dem Körperschwerpunkt befindet. Dadurch wird das nach hinten Kippen des Beckens verhindert und ein ausgewogenes, korrektes Sitzen ermöglicht



FALSCH




FALSCH



Diese Sitzposition führt dazu, dass das Becken nach hinten kippt und das Gesäß nach vorne rutscht.

Entfernen/Anbringen der Kissen auf der Sitzfläche und der Rückenlehne:

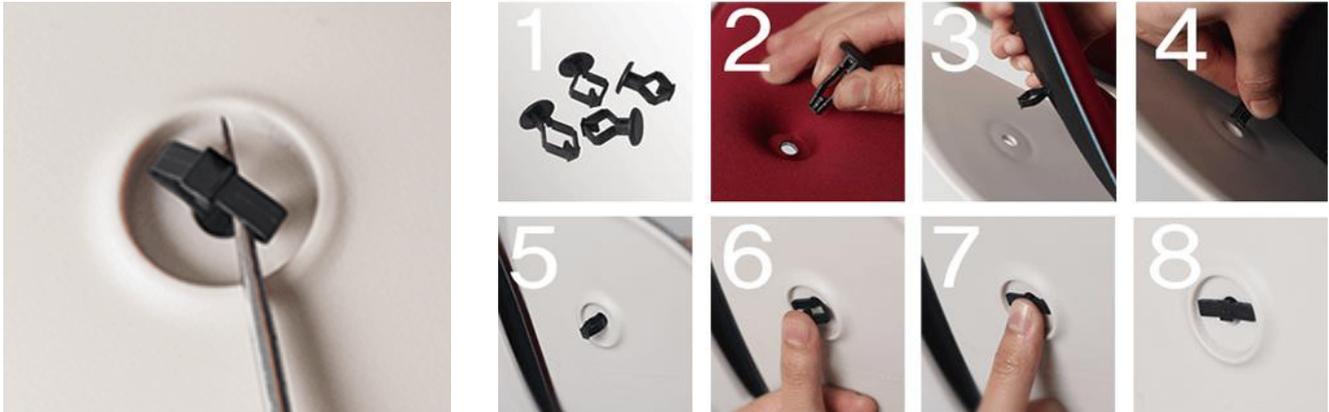

Zur Reinigung oder wenn Sie die Farbe der Kissen für Ihren Ori-Back wechseln möchten, können Sie die Kissen einfach abnehmen.

Entfernen Sie alle Kunststoffclips (Foto 1), indem Sie mit einem dünnen Schlitzschraubenzieher o.ä. in den Schlitz stechen und den Kunststoffdorn aus der Bohrung ziehen. Ziehen Sie die Kunststoffclips Richtung Kissen aus dem Ori-Back.

Montieren Sie die Kissen, indem Sie die Kunststoffclips durch die Löcher der Kissen, Sitzfläche und Rückenlehne stecken (Foto 2, 3, 4, 5). Fixieren Sie die Kunststoffclips, indem Sie den Dorn in die Bohrung drücken, bis er einrastet (Foto 6, 7, 8).

Reinigung:



Reinigen Sie die Kissen unter fließendem Wasser (Handwäsche) mit milden Reinigungsmitteln.

Verwenden Sie keine Waschmaschine, keinen Trockner, nicht bügeln.

Reinigen Sie die Sitzfläche und Rückenlehne unter fließendem Wasser mit milden Reinigungsmitteln oder wischen Sie sie feucht ab.

Keine scharfen Werkzeuge verwenden.

Gefahrenhinweise:



Beim Aufklappen des Ori-Backs besteht Klemmgefahr für die Finger. Verwenden Sie Ori-Back nicht wenn die Oberfläche instabil oder gefährlich ist. Wenn die Gefahr besteht, die Sitzoberfläche zu beschädigen, legen Sie vorher eine Matte o.

ä. auf. Wenn Sie an einer chronischen Erkrankung der Wirbelsäule leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt. Wenn Sie während der Anwendung Beschwerden verspüren, beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt. Die Anwendung für Säuglinge und Kleinkinder ist verboten. Die Verwendung in Fahrzeugen ist nur bis 15km/h Bauartgeschwindigkeit und nur bei Verwendung eines Sicherheitsgurtes zulässig. Schwere Unfälle könnten sonst die Folge sein.



Die Ori-Back Lordosenstütze dient der Unterstützung der Körperhaltung beim Sitzen, bitte nicht darauf lehnen oder Ihr volles Körpergewicht darauflegen, dadurch kann sie beschädigt werden.



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden-Notfall-Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 699 22 99 888

**Generalimporteur für Österreich, Deutschland, Schweiz,
Liechtenstein, Luxemburg:**

Help-24 GmbH
Percostraße 15, 1220 Wien
+43 (0) 12706108 – info@help-24.at
www.help-24.at

Hersteller:

Nihon-Oriback Co. Ltd.
7-13-6-2F, Ginza
Tokyo-Chuo, Japan
www.oribackjapan.com