

ThevoAutoActiv

Das MiS Micro-Stimulations®-System



Dekubitusprophylaxe und
-therapie bis inkl. Grad 2 (n. EPUAP)

- ▶ sofort einsatzbereit
- ▶ Erhaltung der Körperwahrnehmung
- ▶ leichteres Mobilisieren der Patienten
- ▶ integrierbar in jedes Pflegebett
- ▶ keine störende Geräuschkulisse

ThevoAutoActiv

Das MiS Micro-Stimulations®-System

Einordnung des Krankheitsbildes:

- Dekubitusprophylaxe und -therapie bis inkl. Grad 2 (n. EPUAP)
- Palliativpflege und Schmerztherapie

Wie funktioniert die ThevoAutoActiv-Matratze?

Bei dem **ThevoAutoActiv-Matratzensystem** bilden die Komponenten Unterfederung und Matratze eine Einheit. Sie sorgen dafür, dass der Patient weich liegt und trotzdem zur Bewegung angeregt wird.


Im Gegensatz zu herkömmlichen Weichlagerungssystemen verschluckt die **ThevoAutoActiv** nicht die Eigenbewegung des Betroffenen, sondern fördert diese.

Spezielle Luftkanäle in der Matratze, sorgen für einen weichen Liegekomfort. Feinste Regungen – sogar Atembewegungen – werden durch integrierte Flügelfedern in mikrofeine Gegenbewegungen umgewandelt. Dadurch wird die Wahrnehmung der Betroffenen erhalten und gefördert. Die speziell auf das System abgestimmte Federung, ermöglicht ein weiches Liegegefühl durch optimale Druckverteilung.



Matratze

spezielle Luftkanäle, die beim Schnitt der einzelnen Matratzenschichten entstehen, sorgen für einen weichen Liegekomfort und eine optimale Belüftung der Haut.

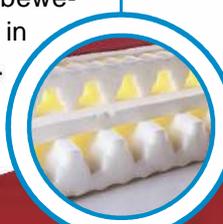

Flügelfedern

sie nehmen kleinste Bewegungen auf und geben diese an den Patienten zurück



Torsions-Federung

weiches Liegegefühl - optimale Druckverteilung, optimale Dekubitus-Prophylaxe und -therapie durch speziell aufeinander abgestimmte Komponenten

Modell	Bezug	BestellNr. 90x200cm	BestellNr. 100x200cm
ThevoAutoActiv 800, 50	Jersey	68200	68201
ThevoAutoActiv 800, 50	Inkontinenz	68100	68101
ThevoAutoActiv 800, 100	Jersey	68400	68401
ThevoAutoActiv 800, 100	Inkontinenz	68300	68301
ThevoAutoActiv 800, 135	Jersey	68600	68601
ThevoAutoActiv 800, 135	Inkontinenz	68500	68501



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Technische Änderungen vorbehalten - © Sunmed 2017 / SM-TVAA-17V01